



AHA! Effekt-Technik
Vertrieb GmbH
Max-Planck-Str. 38
50858 Köln

Tel. (02234) 990 290
Fax (02234) 990 29-10
post@aha-effekt.de
www.roll-a-ramp.de
www.aha-effekt.de

Technische Daten Anwendungs-Informationen

Produkt: Roll-A-Ramp HD 122 cm

Ref.Codes: HD A14801B19, HD A14801B19L, HD A14802B19...HD A148XXB19

Anwendungsbereich:

Rollstuhlrampe für manuell bewegte und Elektro-Rollstühle und Begleitpersonen
Rampe für Rollatoren
Rampe für Pflegebetten u..a. aus dem Versorgungs- und Therapiebereich
Rampe für andere Transporte (eingeschränkte Nutzung möglich, siehe unten)

Aufbau und Funktionsprinzip:

Die Roll-A-Ramp besteht aus einzelnen, kurzen Elementen. Diese bilden beim Transport und bei der Lagerung eine Rolle. Beim Ausrollen und Auslegen der Rampe stoßen die Elemente aneinander und bieten somit gegenseitig Halt. Die Rampe kann nach Gebrauch wieder zur Rolle geformt werden. Die Verbindungen der Elemente können geöffnet werden, und es können zusätzliche Elemente eingefügt oder Elemente entnommen werden.

Rampentyp: Mobile oder stationär befestigte
Rampe

Material: Aluminium, eloxiert

Verbindungselemente: Stahl, oberflächenbehandelt

Schutzkappen (gelb) Weichkunststoff

Verfügbare Längen: ab ca. 60,5 cm in jeweils um
15,24 cm wachsende Länge

Größte verfügbare Länge: keine Beschränkung

Breite: 121,92 cm (von Aufkantung außen bis Aufkantung außen gegenüber)


Spurweite: 120 cm

Außenmaß über alles (Raumbedarf): 123,9 cm

Eigengewicht: 17,84 kg/pro m

Max. Belastbarkeit: 300kg bis Länge 183 cm

Bei längeren Rampen sind Stützfüße erforderlich.

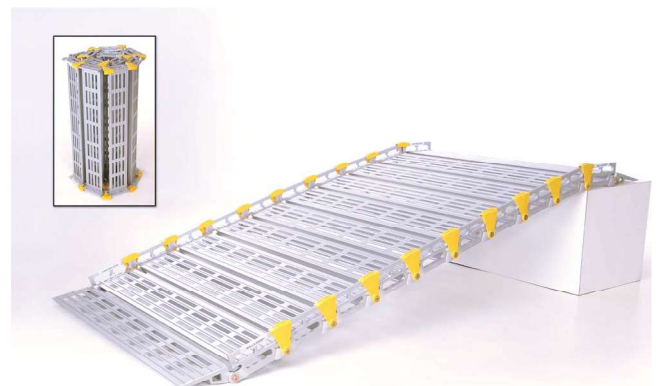

Abbildungen:
Zusammengerollte Rampe,
ausgelegte Rampe
2 verbundene Einzelelemente

Stützfüße:

1 Paar Stützfüße für Rampen ab 213 cm.

Längere Rampen müssen mindestens nach jeweils 183 cm mit Füßen unterstützt werden.

Stützfüße müssen immer paarweise und parallel zueinander positioniert werden.

Technische Daten Anwendungs-Informationen

Produkt: Roll-A-Ramp HD 122 cm

Gebrauchstemperatur: keine Einschränkung bekannt

Reinigung: mit Wasser und Hochdruckreiniger, keine Reinigungsmittel und keine harten Putz Hilfsmittel verwenden

Wintereinsatz: Schnee abfegen, bei festem Eis Druck auf die Rampe ausüben, damit das Eis sich lösen kann

Pflege nach Wintereinsatz: Sollte die Rampe mit Streusalz in Verbindung gekommen sein, müssen die Schraubverbindungen auf Rost geprüft und ggf. ausgetauscht werden.

Besondere Hinweise für die Anwendung bei industriellen Transporten:

Das Profil der Rampe ist für Gummirollen optimiert. Für andere Anwendungen als Rollstühle und Rollatoren muss auf die Bereifung geachtet werden. Gummireifen von Transportgeräten sind bis zur maximalen Belastungsgrenze (siehe Angabe oben) geeignet. Rollen aus Hartplastik können bei Belastung mit hohem Gewicht oder größerer Geschwindigkeit typische Schäden an den Profilen verursachen. Diese Rollen sind für den Einsatz auf einer Roll-A-Ramp nicht geeignet.

Hubwagen und Gabelstapler: Nicht geeignet, da sie Schäden verursachen können.

Entwickler: DT J Inc DBA Roll-A-Ramp, ND Fargo, USA

Hersteller (Zusammenstellung und Endmontage): AHA! Effekt-Technik Vertrieb GmbH, Köln

Ursprungsland: Bundesrepublik Deutschland